

ANRISK® 앱 이용 안내

| 인공지능 뇌동맥류 발병 위험 평가 서비스

목차

1. 앱 다운로드	02
2. 로그인	02
3. 사용권 등록하기	03
4. 간편인증으로 분석하기	04
5. 직접 입력으로 분석하기	07
6. 분석 보고서	09

1. 어플 다운로드

1. 애플 스토어(아이폰), 혹은 구글 플레이 스토어(안드로이드)에서 앱을 다운로드해 주세요.



2. 로그인

1. ANRISK® 앱을 실행하고 구글 또는 애플 계정으로 로그인해 주세요.

i 회원이 아니실 경우 회원가입이 필요합니다. 안내에 따라 진행해 주세요.




2. 간편암호를 입력하여 앱 잠금을 해제해 주세요.

i 앱을 처음 사용하는 경우, 간편암호 설정 후 진행하실 수 있습니다.



3. 사용권 등록하기


1. 홈 화면에 있는 우측 상단에 있는 버튼을 누르거나 설정 페이지로 이동해 주세요.
2. 설정 페이지에서 '사용권' 오른쪽의 화살표 '>'를 눌러주세요.
3. 사용권 창이 뜨면 '사용권 등록하기' 버튼을 눌러서 사용권 등록 페이지로 이동해 주세요.
4. 번호 입력란에 보유하신 사용권 앞면에 기재된 10자리 숫자를 입력하고 '다음' 버튼을 누르면 사용권이 등록됩니다.

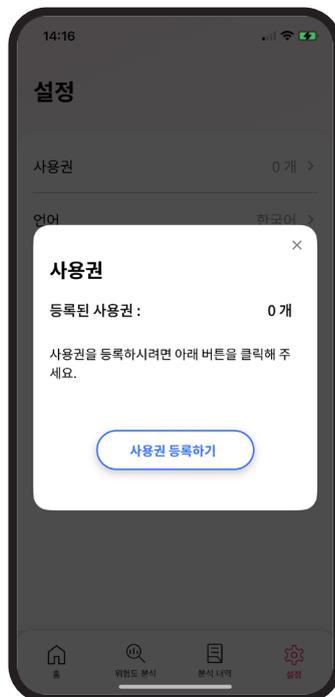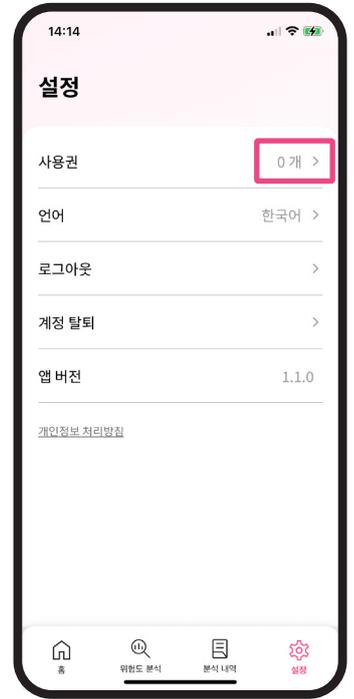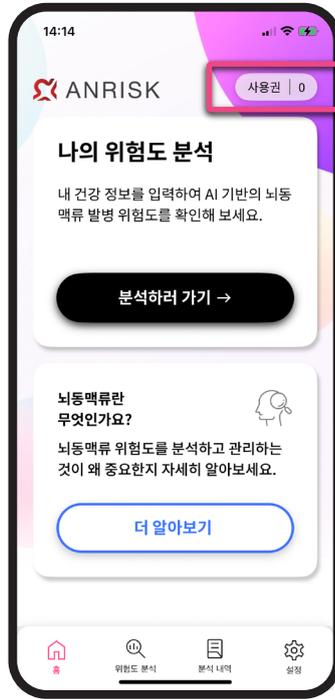


 사용권 관련 문의는 '(주)탈로스' 카카오톡채널로 문의하시기 바랍니다.

4. 간편인증으로 분석하기


1. 로그인 후 홈 화면에서 ‘분석하러 가기’ 버튼을 눌러주세요.
2. ‘간편인증으로 불러오기’ 버튼을 눌러서 국민건강보험공단에서 나의 과거 건강검진 결과를 손쉽게 불러오세요.

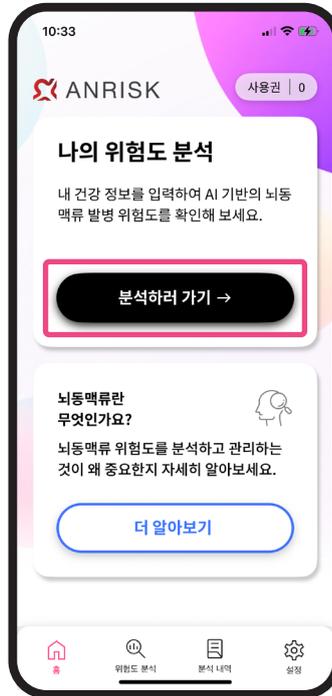


i 등록된 사용권이 없으면 ‘사용권 등록’ 페이지로 이동 됩니다. 여기에 보유하신 사용권에 기재된 10자리 숫자를 입력해서 분석을 계속해 주세요.



사용권 관련 문의는 ‘(주)탈로스’ 카카오톡채널로 문의하시기 바랍니다.

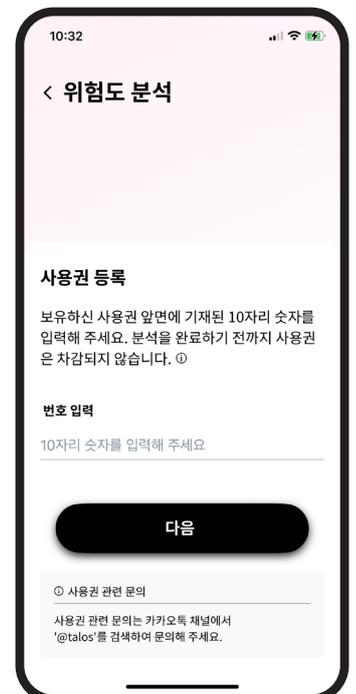

3. 기본 정보를 입력하고 ‘다음’ 버튼을 눌러서 다음 페이지로 이동해 주세요.
4. 인증 수단을 선택해 주시고 ‘다음’ 버튼을 눌러 주세요.

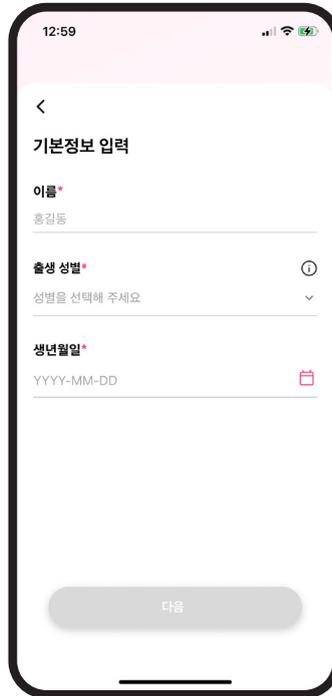



i 선택하신 인증 수단으로 인증 요청 메시지를 확인하고 인증을 완료한 후에 ‘인증 완료’ 버튼을 눌러 주세요. 인증 완료하기 전에 버튼을 누르면 인증이 실패 됩니다.



5. 인증이 완료되면 내역을 확인해 주세요. 내역을 확인한 뒤 ‘이 내역으로 분석 진행하기’ 버튼을 누르면 추가 설문 페이지로 이동 됩니다.


※ 필수 항목이 누락되면 분석할 수 없습니다.

6. 가족력, 또는 흡연 여부 질문에 응답 후 ‘예’ 버튼을 누르면 분석이 시작됩니다.

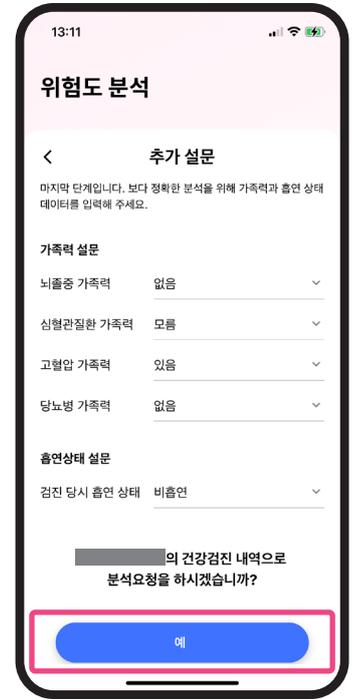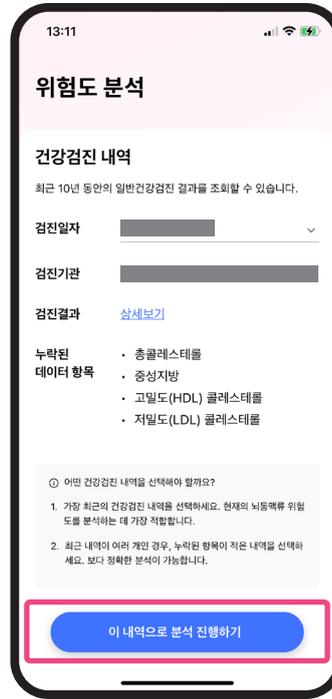

5. 직접입력으로 분석하기


1. 로그인 후 홈 화면에서 ‘분석하러 가기’ 버튼을 눌러주세요.
2. ‘직접 입력’ 버튼을 눌러 건강검진 데이터를 직접 입력하여 분석을 요청할 수 있습니다.

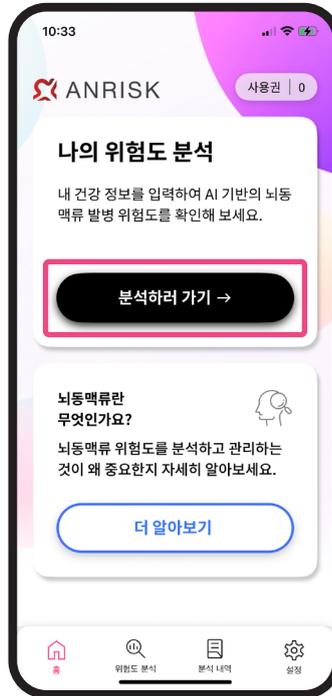


i 등록된 사용권이 없으면 ‘사용권 등록’ 페이지로 이동 됩니다. 여기에 보유하신 사용권에 기재된 10자리 숫자를 입력해서 분석을 계속해 주세요.





사용권 관련 문의는 ‘(주)탈로스’ 카카오톡채널로 문의하시기 바랍니다.

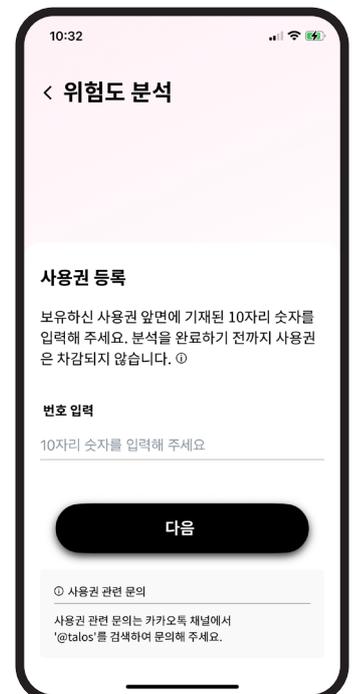

3. 기본 정보와 검진 데이터를 직접 입력해 주세요.

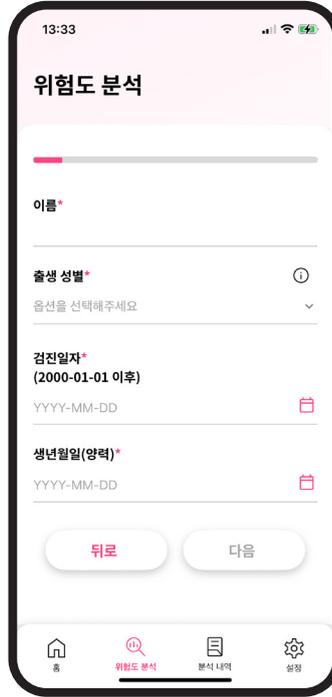

4. 가족력과 흡연 여부 관련 질문에 답해 주시고 마지막 단계에서 개인 건강 정보 이용 동의서에 동의하면 분석 요청을 할 수 있습니다.

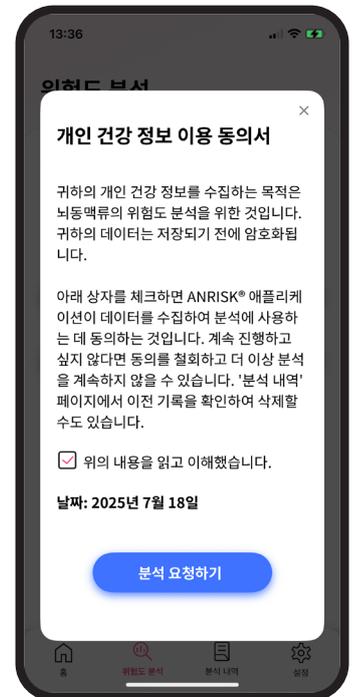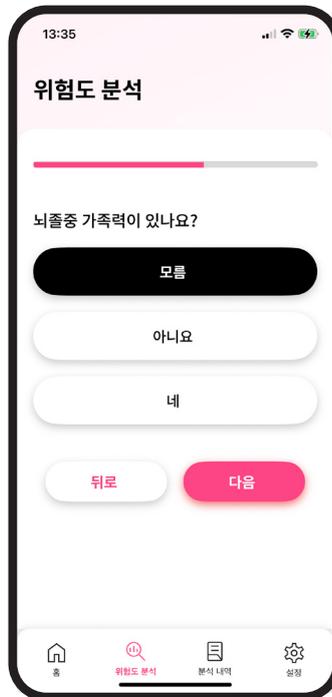

6. 분석 보고서

1. 분석이 완료되면 자동으로 분석 내역 페이지로 이동됩니다. 자세한 분석 내역을 조회하기 위해 분석 날짜가 있는 버튼을 눌러주세요.
2. 분석 결과 페이지 우측 상단에 공유 '🔗' 버튼을 누르면 분석 결과 파일을 PDF 형식으로 공유하실 수 있습니다. 공유 방식은 'QR코드 생성'과 '이메일로 보내기'가 있습니다. QR코드를 생성하면 생성된 이미지를 스크린캡처로 저장하시고 '이메일로 보내기'를 선택하시면 원하시는 이메일 주소를 입력해서 PDF 파일을 전송할 수 있습니다.

i QR코드와 이메일로 전송된 보고서 링크의 유효 기간은 1일입니다. 만료되기 전에 보고서 파일을 저장해 주세요.

